



NOVUS™

Masque nasal de PPC



Assistance Respiratoire au Domicile ▪ Novus masque nasal de PPC




Novus™ masque nasal de PPC

Le masque nasal de PPC Novus d'Intersurgical est une interface confortable et légère conçue pour une utilisation chez le patient adulte (>30kg) dans le cadre d'une thérapie PPC ou à double niveau de pression prescrite au domicile.

Le masque nasal de PPC Novus a été développé pour offrir une solution simple et bien tolérée dans le domaine de l'assistance respiratoire au domicile. Il contient peu d'éléments, représentant un réel bénéfice lors de la mise en place et de l'ajustement, ainsi que lors du nettoyage dans un environnement domestique.

Le masque nasal de PPC Novus est disponible en deux tailles, avec une bulle souple en silicone, pour offrir un ajustement efficace et confortable, convenant à la majorité des patients.

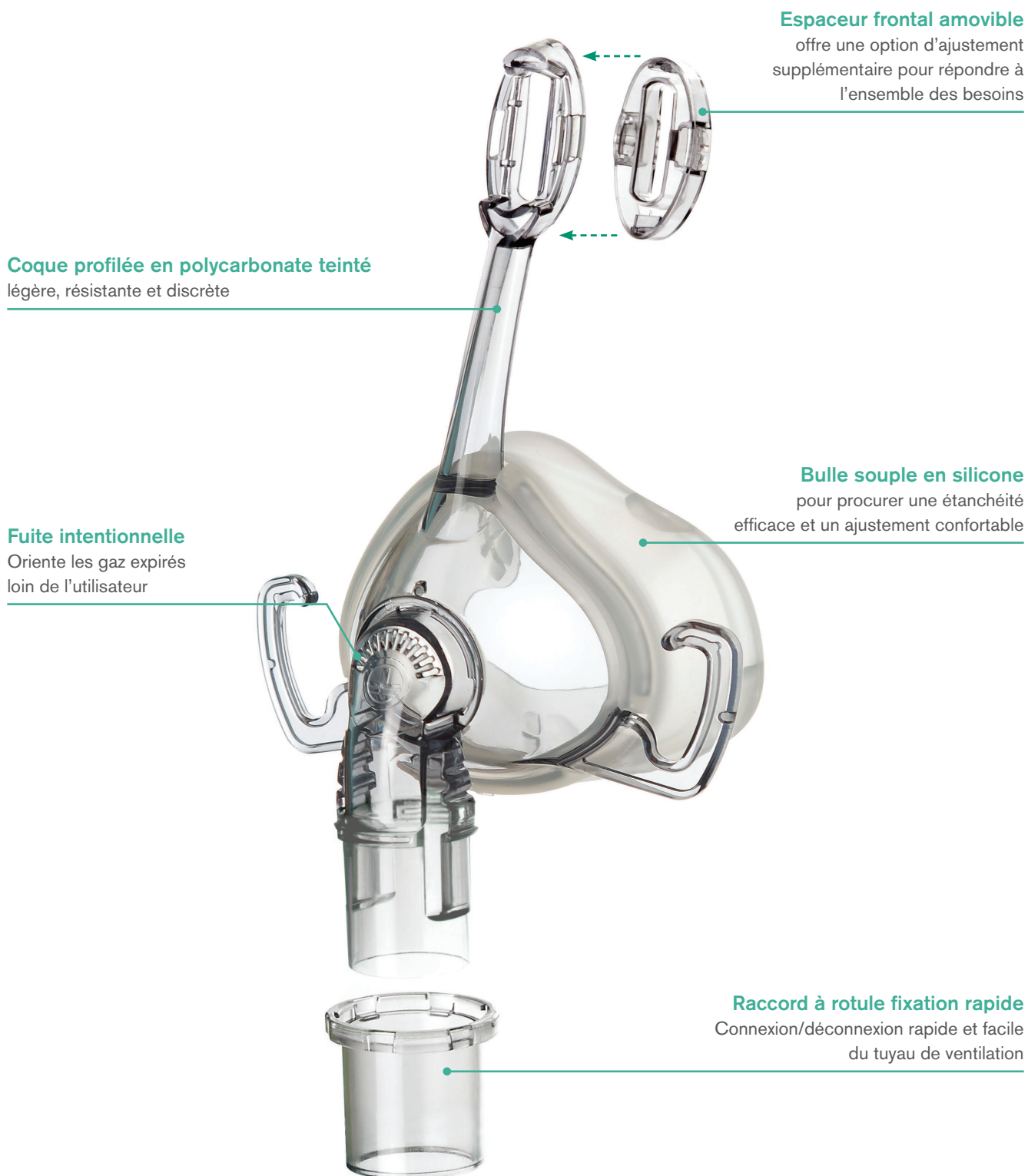




Intersurgical Novus™ masque nasal de PPC

Serre-tête respirant
Confortable pour l'utilisateur

Système d'attache rapide

facilite la mise en place du serre-tête et peut être placé d'un côté ou l'autre du masque, pour convenir à chaque utilisateur

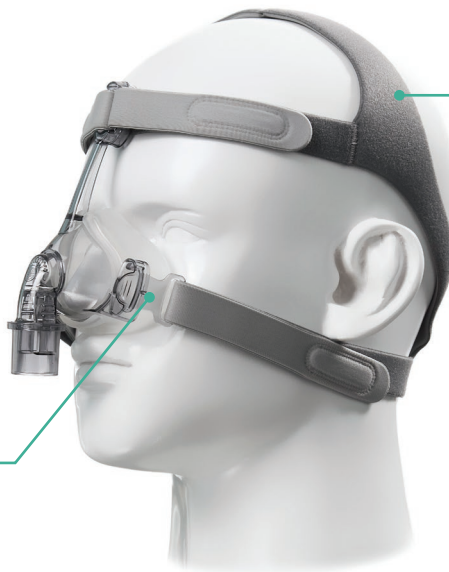

Informations de commande

Le masque nasal de PPC Novus est disponible en deux tailles, moyen et grand.

Réf.	Description	Langues incluses dans les Instructions d'Utilisation	Qté/bte
7770000	Novus masque nasal de PPC, grand	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien	8
7790000	Novus masque nasal de PPC, moyen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien	8

Accessoires

Réf.	Description	Qté/bte
7776000	Serre-tête pour Novus masque nasal de PPC (avec clip pour système d'attache rapide inclus)	20
5318000	Tuyau 22mm intérieur lisse polypropylène avec raccords souples, 22F-22F, 1.8m	50
5418000	Tuyau 15mm intérieur lisse polypropylène avec raccords souples, 22F-22F, 1.8m	60





Mise en place du masque

Comment obtenir un ajustement confortable et sans fuite



1. Retirer le raccord à rotule du masque, en pressant sur les barrettes de maintien.



2. Insérer le raccord à rotule dans le tuyau respiratoire.



3. Maintenir le masque et le serre-tête.



4. Placer le masque sur le nez et le maintenir en position. Enfilez doucement le serre-tête autour de la tête en s'assurant que les lanières inférieures passent sous les oreilles.



5. Vérifier que les lanières ne sont pas torsadées, puis faire passer la lanière restante dans le crochet du masque.



6. Pour ajuster les lanières frontales, les détacher, les tirer de manière uniforme, puis les attacher de nouveau sur le serre-tête. La fixation doit être sécurisée mais non trop serrée.



7. Pour ajuster le masque, détacher les lanières inférieures, les tirer de manière uniforme puis les attacher de nouveau. La fixation doit être sécurisée mais non trop serrée.



8. S'assurer que l'appareil de PPC est en marche. De l'air doit s'écouler du tuyau de ventilation. Connecter le raccord à rotule et le tuyau sur le raccord coudé du masque jusqu'à entendre un 'clic'.



9. Si nécessaire, réajuster les lanières du serre-tête pour supprimer les fuites éventuelles. **Ne pas trop serrer le masque.** Si des fuites persistent, soulever le masque puis le repositionner sur le nez avant de réajuster les lanières du serre-tête.



33, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Pérípole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 et ISO 14001:2004

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso

IS1.44 FR • Issue 1 03.18