




Respi-Check™ Masques avec indicateur respiratoire

Indication visuelle, simple et immédiate, de la fréquence respiratoire

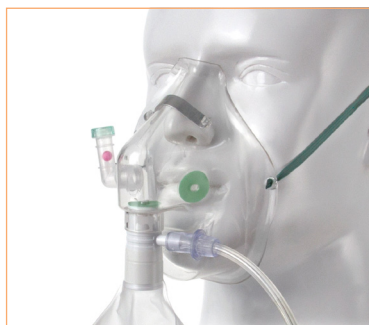

Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Concentration Variable en Oxygène (Bas Débit)



Respi-Check™ masque avec indicateur respiratoire

La fréquence respiratoire est un révélateur précis sur la gravité de l'état de santé. Soigneusement mesurée, elle alerte des dysfonctionnements respiratoires et métaboliques, particulièrement en situation de soins critiques. L'indicateur respiratoire Respi-Check offre une solution simple et économique pour améliorer la précision des mesures de la fréquence respiratoire.


Pourquoi mesurer la fréquence respiratoire ?

La fréquence respiratoire doit être surveillée chez quiconque nécessitant une oxygénothérapie intervenant dans le traitement d'une maladie, d'un traumatisme ou en phase de réveil. Elle est toutefois évaluée de façon peu précise et faiblement monitorée.

Comment est mesurée la fréquence respiratoire ?

Le Respi-Check offre une information précise et en temps réel sur le travail respiratoire du patient. Il renferme une bille visible contenu dans un tube en plastique transparent intégré au masque.

Le débit d'oxygène s'écoulant dans le masque pousse la bille vers le sommet du tube. La légère pression négative exercée par l'effort inspiratoire du patient tire la bille vers la base du tube, offrant ainsi une indication visuelle instantanée de chaque inspiration prise.

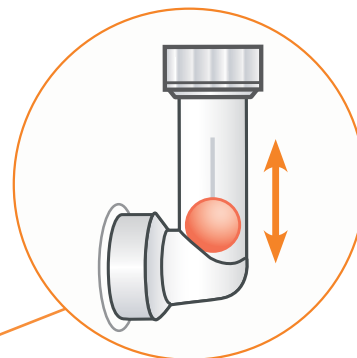

Indicateur respiratoire Respi-Check

Offre une solution simple et économique pour améliorer la précision des mesures de la fréquence respiratoire

illustration

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1202000	Respi-Check, masque oxygène haute concentration adulte, avec indicateur respiratoire et tuyau	2.1 m	20
1216000	Respi-Check, masque oxygène moyenne concentration adulte, avec indicateur respiratoire		20
1292000	Respi-Check, masque oxygène haute concentration pédiatrique, avec indicateur respiratoire et tuyau	2.1 m	20

IS10.7 FR ▪ Issue 10 10.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP