

Vérifications avant usage : DuoFlow™ circuit respiratoire double lumière




1 Connectez la branche expiratoire du circuit à la source de gaz.



2 Retirez toutes les connexions Patient.



3 A l'aide du testeur de fuite fourni, obturez la section expiratoire du circuit au niveau de la connexion Patient.

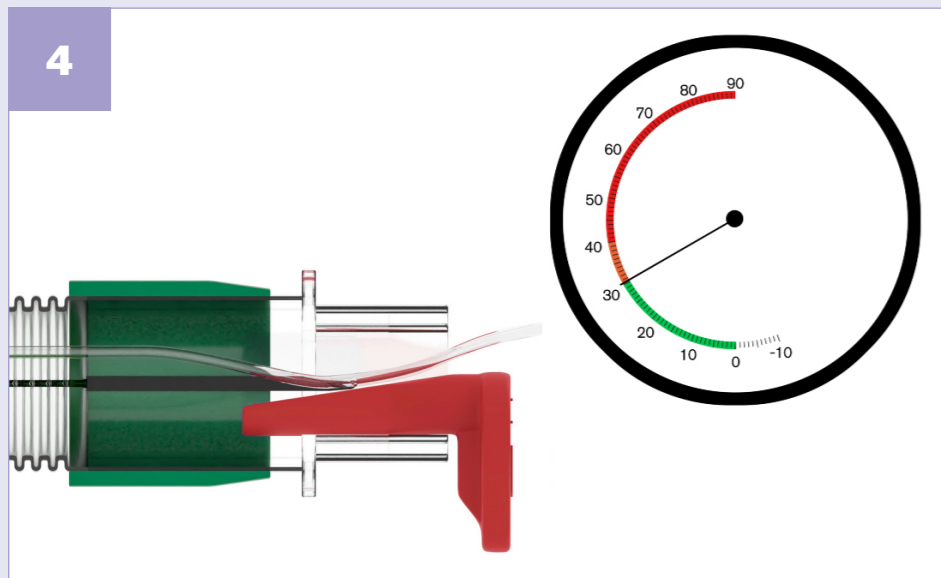

4 Pressurisez la branche expiratoire à 30cmH₂O pour confirmer l'absence de fuite ou écart de pression.



5 Si aucun écart de pression n'est détecté, confirmant ainsi l'intégrité du septum interne, connectez le circuit respiratoire au respirateur/station d'anesthésie et terminez tous les contrôles préalables recommandés dans les instructions d'utilisation du respirateur/station d'anesthésie.



6 Un test de fuite du système entier et de tous ses accessoires doit être réalisé avant utilisation.