



Kits Dual Venturi avec masque

Délivrance précise d'oxygène pour adultes et enfants



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Concentration Fixe en Oxygène (Haut Débit)


Kits Dual Venturi avec masque

La valve Dual Venturi est constituée d'un corps principal et de deux buses à code-couleur (blanc et bleu). La plage de concentrations d'oxygène délivré est déterminée par la buse à code-couleur connectée au système.


La buse à code-couleur blanc délivre des concentrations de 24%, 26%, 28% et 30%. La buse à code-couleur bleu délivre des concentrations de 35%, 40% et 50%. Le débit d'oxygène recommandé, à appliquer sur le débitmètre, est indiqué à côté de chaque concentration.

Ces débits sont étudiés pour que le patient reçoive approximativement un débit total de 40L/min, afin de couvrir les besoins "inspiratoires normaux de pointe" du patient¹. La conception de la Dual Venturi délivre des concentrations précises en oxygène².

La concentration délivrée n'est pas affectée par le modèle respiratoire du patient sous réserve que le débit optimal indiqué sur la valve est appliqué sur le débitmètre à oxygène.

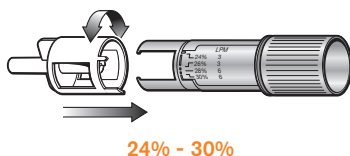

Concentration d'Oxygène	Débitmètre oxygène Litres par minute (L/min)				Débit total délivré au patient litres par minute (L/min)
	2	3	4	5	
24%	52	78	104	130	
26%	31	47	63	78	
28%	22	34	45	56	
30%	18	26	35	44	

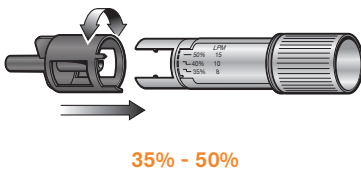

Concentration d'Oxygène	Débitmètre oxygène Litres par minute (L/min)			Débit total délivré au patient litres par minute (L/min)
	8	10	15	
35%	45	56	84	
40%	33	42	62	
50%	22	27	41	

A NOTER : Les valeurs en **gras** indiquent le débit total délivré au patient quand le débit d'oxygène recommandé est appliqué sur le débitmètre.

Référence	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1147000	Kit Dual Venturi avec masque adulte et tuyau	1.8m	40
1187000	Kit Dual Venturi avec masque pédiatrique et tuyau	1.8m	50

Faire une demande

Références

1. Clinical practice in Respiratory Care. James B.Fink.
2. Complies with EN 13544-3:2001, Respiratory Therapy Equipment - Part 3: Air Entrainment Devices



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.