

Mise en place du masque médical i-Pro™

Préparatifs



1. Avant utilisation, lavez-vous les mains et assurez-vous que le masque est intact et exempt de toute obstruction ou corps étranger.



2. Tenez le masque dans la paume, en évitant de toucher le filtre, et laissez les élastiques pendre sous votre main.

Mettre le masque



3. Placez la mentonnière sur le menton, ourlet nasal vers le haut. Passez l'élastique inférieur par-dessus la tête et laissez-le pendre autour du cou sous les oreilles.



4. Passez l'élastique supérieur par-dessus la tête et positionnez-le à l'arrière du crâne au-dessus des oreilles.



5. Maintenez le masque sur le visage et tirez la boucle latérale de l'élastique vers le haut pour serrer le masque – prenez soin de ne pas toucher le filtre en enfilant le masque.



6. Toujours en maintenant le masque sur le visage, tirez la boucle latérale de l'élastique vers le bas pour serrer le masque.



7. Pour vérifier l'étanchéité du masque sur le visage, placez deux doigts au-dessus du masque pour s'assurer qu'aucun air ne s'échappe autour de la lèvre étanche pendant l'expiration.



8. Puis placez les deux mains en-dessous du masque pour s'assurer qu'aucun air ne s'échappe autour de la lèvre étanche pendant l'expiration. Prenez soin de ne pas déplacer le masque. Si de l'air fuit, ajustez la position des élastiques et assurez-vous que les bords du masque soient bien ajustés contre le visage.

