

# Guide d'installation de l'InterCooler™



Matériel nécessaire : unité InterCooler, support de montage, circuit respiratoire bichauffé et kit d'adaptation InterCooler



Montez l'humidifient sur le support de montage tandem InterCooler.



Montez l'InterCooler sur le support de montage tandem InterCooler.



Insérez la poche de collecte des liquides dans l'InterCooler.



Insérez la cassette InterCooler en vous assurant que le bord arrière est situé sous l'ergot dans l'embase de l'InterCooler.



Poussez la cassette vers le bas et pressez le loquet. Assurez-vous que le loquet soit enclenché sur la face avant de la cassette (voir fig.1 page suivante).



Connectez la branche expiratoire à fil chauffant sur le raccord 22mm mâle de la cassette InterCooler.



Connectez la branche de retour au raccord 22mm femelle de la cassette InterCooler.



Connectez l'autre extrémité de la branche de retour sur le respirateur. Si une filtration est requise, utilisez le filtre 7 jours Air-Guard Clear 7.



Allumez l'InterCooler en pressant le bouton d'alimentation. Le bouton s'allume en vert si le système est correctement configuré.

## Remplacer la poche de collecte des fluides\*



Quand la poche de collecte des liquides est pleine, le bouton d'alimentation clignote en **bleu**.



Pour remplacer la poche de collecte des liquides **pressez** le loquet de l'InterCooler™ pour libérer la cassette.



Retirez la poche de collecte pleine et remplacez-la par une nouvelle.



Insérez une nouvelle poche de collecte des liquides.



Poussez la cassette vers le bas et pressez le loquet. Assurez-vous que le loquet soit enclenché sur la face avant de la cassette (voir fig.1 ci-dessous).



Le bouton s'allume en **vert** si le système est correctement configuré.

**A Noter :** La ventilation n'est pas interrompue lors du changement de la poche de collecte des liquides.

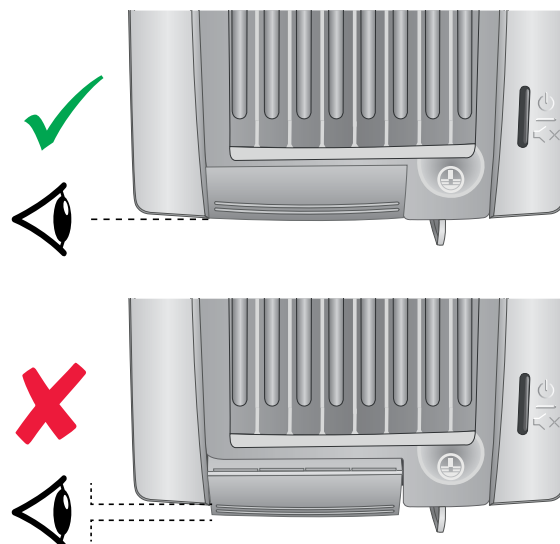


Figure 1: S'assurer que le loquet est enclenché sur la face avant de la cassette.