



Mise en place du circuit respiratoire Dri-Therm™

Ce document ne remplace pas les Instructions d'Utilisation fournies avec chaque carton de produits.
Pour les détails complets sur l'utilisation du circuit respiratoire Dri-Therm, référez-vous toujours aux Instructions d'Utilisation.

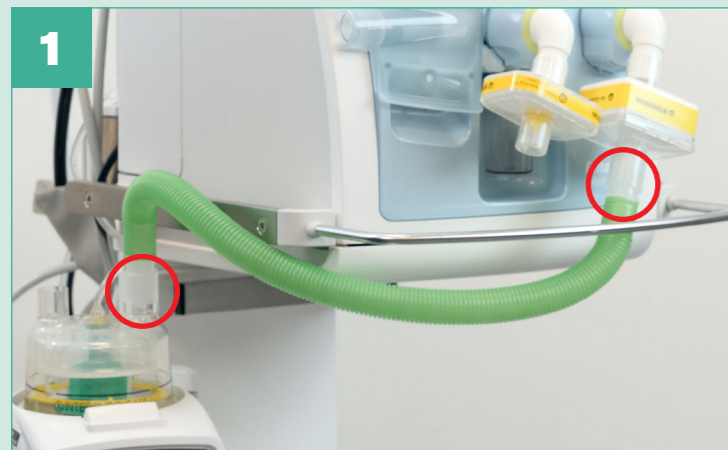

D'un geste de pousser-tourner, connectez la branche courte entre le port inspiratoire du respirateur et la chambre d'humidification.

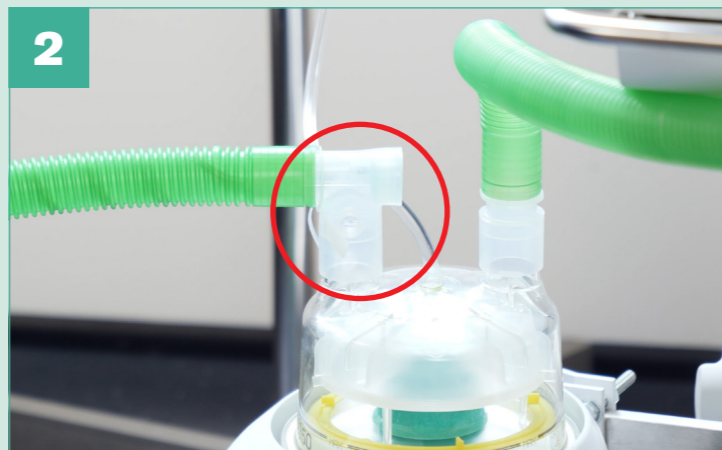

D'un geste de pousser-tourner, connectez la branche inspiratoire chauffée (verte) sur la chambre d'humidification.



D'un geste de pousser-tourner, connectez la branche expiratoire chauffée sur le raccord expiratoire du respirateur.



Côté chambre d'humidification, insérez la sonde de température proximale dans l'orifice dédié situé sur le raccord de la branche inspiratoire chauffée (verte).



Côté Patient, insérez la sonde de température distale dans l'orifice dédié situé au niveau du raccord en Y.



Côté chambre d'humidification, insérez le câble de fil chauffant dans l'orifice dédié (prise trèfle) situé sur le raccord de la branche inspiratoire chauffée (verte).



Côté port expiratoire du respirateur, insérez le câble de fil chauffant dans l'orifice dédié (prise ovale) situé sur le raccord de la branche expiratoire chauffée.

Le circuit respiratoire Dri-Therm est à présent correctement installé et prêt à être utilisé.