




Canules de Guedel monobloc

Une conception axée sur la sécurité

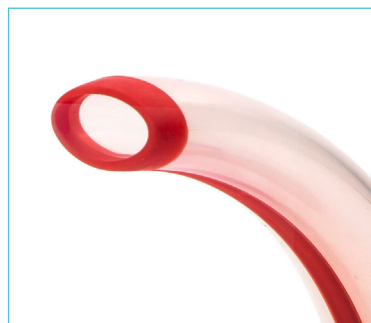

Gestion des Voies Aériennes • Dispositifs pour Voies Aériennes

Canules de Guedel monobloc


Une conception axée sur la sécurité

Grâce aux dernières technologies de fabrication, Intersurgical a produit la première innovation majeure en conception de canules de Guedel, depuis ces trente dernières années.

En combinant deux matériaux aux caractéristiques physiques très différentes, injectés dans un même moule, le design monobloc ne nécessite pas de renfort anti-morsure interne séparé, présent sur les canules conventionnelles.

Un renfort anti-morsure détaché ou mal fixé constitue un réel danger pour la sécurité du patient et a fait l'objet de plusieurs signalements d'incidents. Le nouveau concept Monobloc supprime tous les risques qui en découlent.

Outre une meilleure sécurité, le design Monobloc comporte également une extrémité distale lisse prévenant le risque de blessure du patient. En complément, une gamme stérile est également disponible.

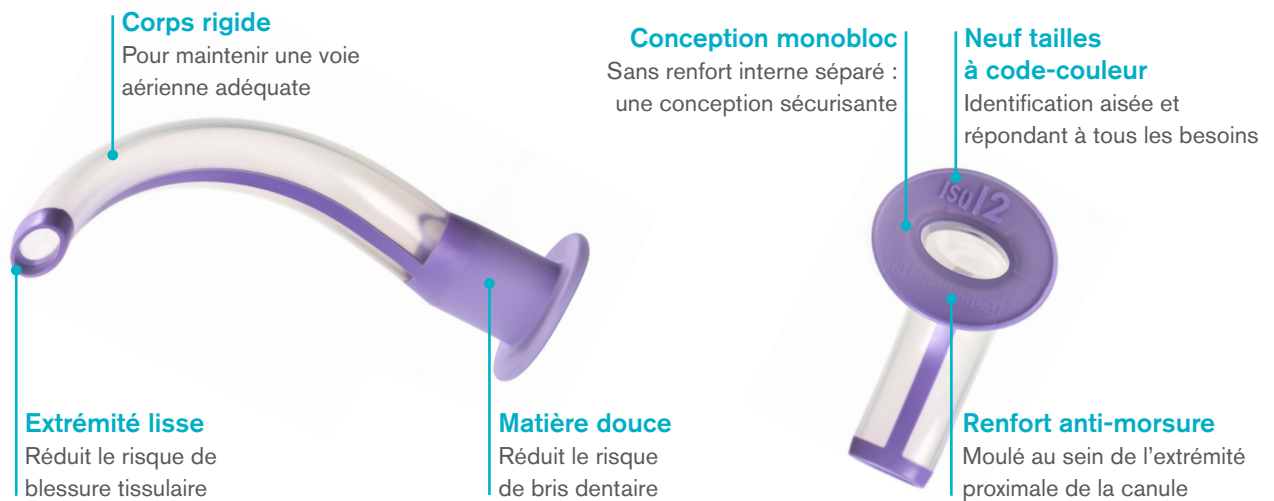



ISO 5364:2016 – Lignes directrices sur le code-couleur

Dans la version la plus récente de l'ISO 5364:2016 Matériel d'Anesthésie et de Réanimation Respiratoire – Canules Oropharyngées, une nouvelle exigence relative aux codes-couleurs est implémentée, visant à accroître la sécurité des patients et offrir une cohérence entre les produits des différents fabricants.

Afin de nous conformer à ces nouveaux codes-couleurs spécifiés par la norme ISO 5364:2016, Intersurgical a dû ainsi mettre à jour quatre tailles de ses Canules de Guedel. Les tailles ayant changé sont les suivantes :

- Taille ISO 9.0 ; de Orange à Jaune
- Taille ISO 7.0 ; de Jaune à Blanc
- Taille ISO 6.5 ; de Blanc à Marron
- Taille ISO 3.5 ; de Rose à Vert Clair



Les quatre tailles de canules de Guedel Intersurgical ayant subi un changement de couleur selon la mise à jour de la norme.

Chaque service devra considérer localement la manière d'assurer la mise en œuvre de ce changement. En effet, l'utilisation du stock existant peut prendre du temps.

Référence	Taille ISO
1115120 (S*)	12.0
1114100 (S*)	10.0
1113090 (S*)	9.0
1112080 (S*)	8.0
1111570 (S*)	7.0
1111065 (S*)	6.5
1110055 (S*)	5.5
1100050 (S*)	5.0
1000035 (S*)	3.5

Précédente Couleur Intersurgical	
Violet	
Rouge	
Orange	
Vert	
Jaune	
Blanc	
Gris	
Bleu	
Rose	
















Nouvelle Couleur Conforme à l'ISO	
Violet	
Rouge	
Jaune	NOUVEAU
Vert	
Blanc	NOUVEAU
Marron	NOUVEAU
Gris	
Bleu	
Vert clair	NOUVEAU

Extrémité encore plus douce

En continuant à donner la priorité à la sécurité des patients, Intersurgical a encore augmenté la souplesse de l'extrémité de toutes ses Canules de Guedel.

Les canules de Guedel utilisant un matériau dur et rigide à son extrémité représentent une menace significative responsable de traumatismes lors de l'insertion. En utilisant un matériau encore plus doux pour former l'extrémité de la Canule de Guedel Monobloc, le risque de causer un traumatisme aux voies aériennes du patient lors de l'insertion est davantage réduit.



REF	Description	Couleur	Taille	ISO	Qté/bte
1115120 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		5	12.0	70 (70*) 
1114100 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		4	10.0	90 (80*) 
1113090 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		3	9.0	90 (80*) 
1112080 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		2	8.0	100 (100*) 
1111570 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		1.5	7.0	100 (100*) 
1111065 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		1	6.5	20 (20*) 
1110055 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		0	5.5	25 (25*) 
1100050 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		00	5.0	25 (25*) 
1000035 (S*)	Canule de Guedel Monobloc		000	3.5	25 (25*) 

 Produit à faible impact environnemental  Disponible en version stérile

(S*) Ajouter un S à la fin du code produit à sept pour commander la version stérile du produit (la quantité par boîte des produits stériles est indiquée entre parenthèses)

IS6.10 FR • Issue 7 07.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA