




nFlow™

Système pour CPAP nasale du nouveau-né



Soins Intensifs ▪ Circuits Respiratoires

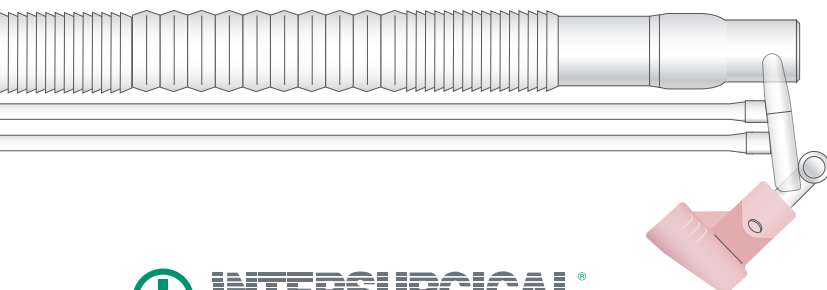

Qualité, innovation et choix

Interagir avec nous



www.intersurgical.fr



nFlow™

Conçu pour prendre soin

Souvent, les plus petits patients ont besoin des plus grands soins. La sécurité et le confort sont vitaux pour aider le nouveau-né dans les premières étapes de sa vie.

Une solution pour la CPAP nasale du nouveau-né

Le système nFlow d'Intersurgical offre une solution complète de soins pour la CPAP du nouveau-né, avec technologie éprouvée 'gas flip', pour un faible travail respiratoire.

nFlow est compatible avec les générateurs de débit conçus pour une utilisation avec la technologie CPAP 'gas flip', fournissant une pression dans le système légèrement supérieure.

Le système nFlow

Le système nFlow est livré pré-assemblé, avec générateur, branche à fil chauffant et tuyau d'évacuation extensible 10mm Superset. L'intégralité du système nFlow est sans phtalates, notamment les tubulures d'apport en gaz frais et de monitoring.

Un choix d'interfaces patient et de bonnets

Les interfaces-patient et les bonnets sont fournis séparément pour éviter toute perte. Utilisez les guides de tailles fournis pour choisir l'option adéquate pour le patient.




Faire une demande

▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr




A

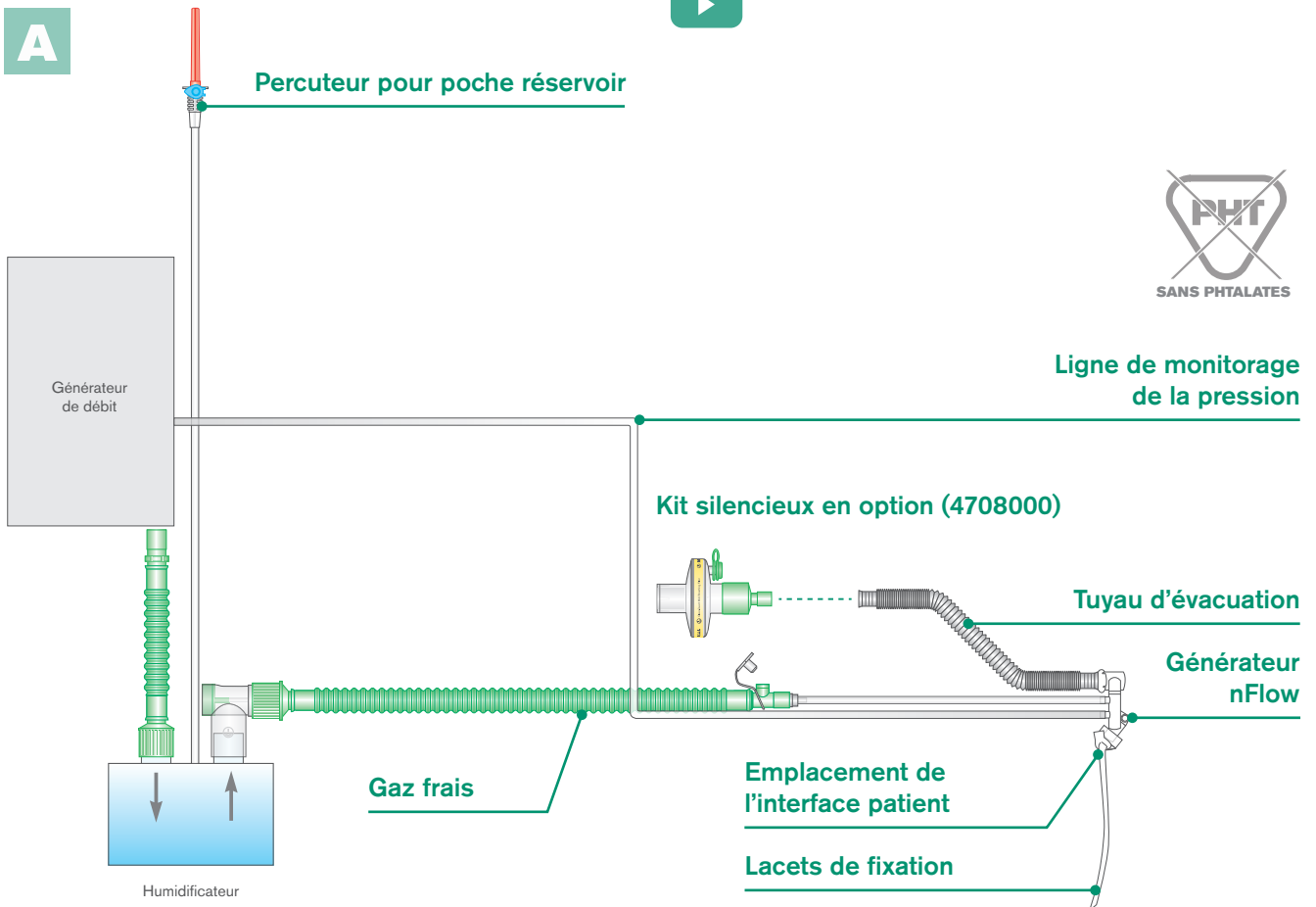



Choix aisé de la taille

Le circuit nFlow contient deux guides de taille afin de simplifier le choix de l'interface-patient et du bonnet pour un meilleur confort de votre patient.

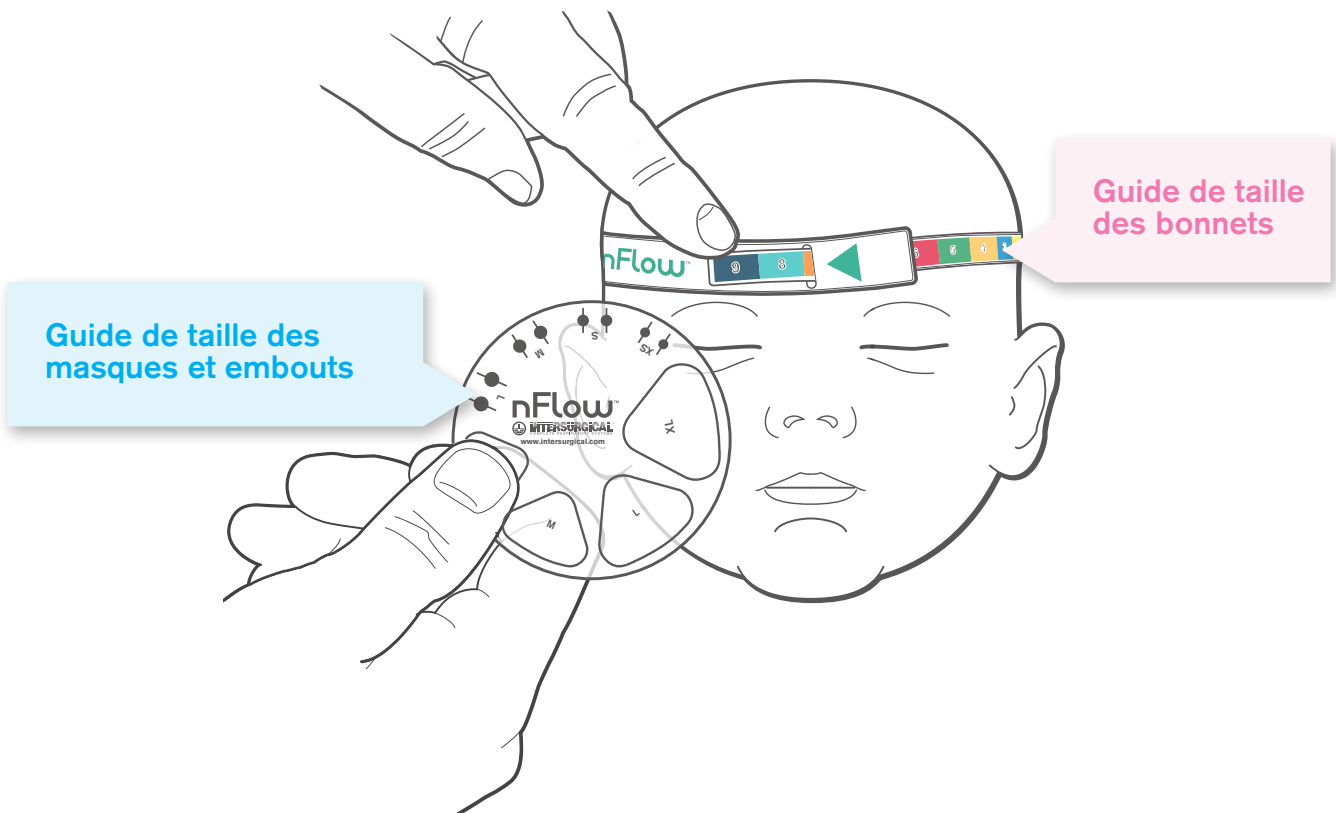


12 bonnets

Disponibles séparément en douze tailles avec code-couleur. Chaque bonnet possède trois attaches Velcro® et des points de fixation sécurisés.



Interface Patient

Les masques et embouts sont disponibles séparément en quatre tailles. Le silicone souple et confortable qui les compose assure un ajustement optimal.

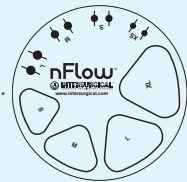

B Bonnets



C Masques nasaux




D Embouts nasaux





Pour simplifier vos commandes, composez votre circuit complet en choisissant parmi les références des groupes A et B, puis les interfaces patient des groupes C et/ou D. A tout moment, vous pouvez commander vos éléments séparément selon vos besoins.

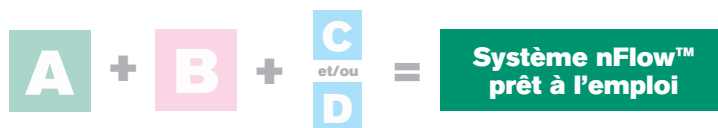

	Référence	Description	Qté/bte
A Systèmes nFlow			
	4700000	nFlow circuit à fil chauffant pour CPAP du nouveau-né, 1.6m	12
	4700001	nFlow circuit à fil chauffant pour CPAP du nouveau-né, 1.8m	10
	4700016	nFlow circuit à fil chauffant pour CPAP du nouveau-né avec ligne de monitoring déconnectable, 1.8m	10
	4708000	Kit silencieux pour nFlow	50
	4700011	Lacets de fixation de rechange pour nFlow	60
B Bonnets pour nFlow			
			Taille
	4707009	Bonnet enfant pour nFlow, marine	taille 9 (40 - 42 cm) 10
	4707008	Bonnet enfant pour nFlow, turquoise	taille 8 (38 - 40 cm) 10
	4707007	Bonnet enfant pour nFlow, orange	taille 7 (36 - 38 cm) 10
	4707006	Bonnet enfant pour nFlow, rouge	taille 6 (34 - 36 cm) 10
	4707005	Bonnet enfant pour nFlow, vert	taille 5 (32 - 34 cm) 20
	4707004	Bonnet enfant pour nFlow, orange clair	taille 4 (30 - 32 cm) 20
	4707003	Bonnet enfant pour nFlow, bleu	taille 3 (28 - 30 cm) 20
	4707002	Bonnet enfant pour nFlow, jaune	taille 2 (26 - 28 cm) 20
	4707001	Bonnet enfant pour nFlow, gris foncé	taille 1 (24 - 26 cm) 20
	4707110	Bonnet enfant pour nFlow, rose	taille 0 (22 - 24 cm) 20
	4707100	Bonnet enfant pour nFlow, gris	taille 00 (20 - 22 cm) 20
	4707000	Bonnet enfant pour nFlow, blanc	taille 000 (18 - 20 cm) 20
C Masques nasaux pour nFlow			
			Taille
	4716000	Masque nasal pour nFlow	extra grand 30
	4706000	Masque nasal pour nFlow	grand 30
	4705000	Masque nasal pour nFlow	moyen 30
	4704000	Masque nasal pour nFlow	petit 30
D Embouts nasaux pour nFlow			
			Taille
	4703000	Embout nasal pour nFlow	grand 30
	4702000	Embout nasal pour nFlow	moyen 30
	4701000	Embout nasal pour nFlow	petit 30
	4711000	Embout nasal pour nFlow	extra petit 30



INTERSURGICAL
SPECIALISTE DE L'ABORD RESPIRATOIRE

7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2

T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr

IS1.16 FR • issue 8 07.19



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP