



Gamme de masques pédiatriques Intersurgical EcoLite™



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Masques Pédiatriques



Gamme de masques pédiatriques Intersurgical EcoLite™

Bienvenue dans la Zone de Confort

La conception unique et les matériaux utilisés dans la fabrication du masque Intersurgical EcoLite™ offrent un confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

Confortable pour le Patient

L'amélioration du confort du patient est l'une des clés du développement du masque Intersurgical EcoLite™. Les dernières techniques de fabrication permettent de combiner deux matériaux sans PVC, donc sans phtalates, au sein d'un même dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical EcoLite™ est transparent, léger et suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en contact avec le visage du patient.

Confortable pour l'Environnement

Le masque Intersurgical EcoLite™ est le pilier de la gamme Eco, véritable reflet de notre engagement dans le développement durable. De nombreux organismes remettent en question l'utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact sur l'environnement. L'utilisation de matériaux alternatifs a permis l'élimination du PVC dans le masque Intersurgical EcoLite™, réduisant de fait l'impact environnemental.

Intersurgical EcoLite

Gamme Eco

Ourlet nasal incurvé

Améliore le maintien et élimine le besoin d'un pince-nez séparé. Conçu pour réduire le risque de contact entre l'oxygène ou le médicament nébulisé et les yeux du patient

Plus léger

Masque fabriqué à l'aide de matériaux légers

Plus écologique

L'absence de PVC dans le masque diminue l'impact environnemental

Lèvre souple étanche


Améliore le confort du patient

La forme et la position des événements expiratoires ont été conçues pour minimiser la réinhalation du Dioxyde de Carbone

Positionnement sur ou sous le menton

Offre un meilleur ajustement quelle que soit la forme du visage

Le matériau transparent formant le corps du masque permet de visualiser le nez et les lèvres du patient. Il est également suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque durant le transport et l'utilisation

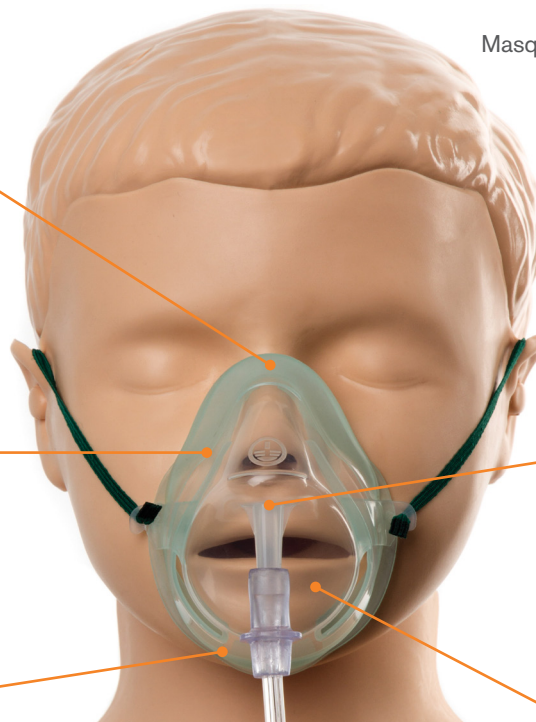

Disponible avec un tuyau à oxygène pourvu d'un raccord universel, pouvant être connecté à un débitmètre muni d'un embout 6mm ou d'un raccord fileté 9/16-18 UNF Diameter Index Safety System (D.I.S.S.)



Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique

Le masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ est le modèle le plus léger et le plus confortable qui soit.



REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte	
1190015	Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite™		42	
1196015	Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite™ avec tuyau	2.1m	40	
1196010	Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite™ avec tuyau sans PVC	2.1m	40	
1196019	Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite™ avec tuyau à raccord universel	2.1m	40	

Kits venturi réglable avec masque pédiatrique

Les kits venturi réglable avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ sont disponibles avec les valves venturi réglables Silente™ et MultiOx™.



REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte	
1138015	Kit venturi réglable Silente, avec masque Intersurgical EcoLite™ pédiatrique et tuyau	1.8m	40	
1118005	Kit venturi réglable MultiOx, avec masque Intersurgical EcoLite™ pédiatrique et tuyau	1.8m	40	



Masque aérosol pédiatrique et kits avec nébuliseurs

Le masque aérosol Intersurgical EcoLite™ pédiatrique est disponible seul ou avec les nébuliseurs Cirrus™2 ou HOT Top™2.



REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1198015	Masque aérosol pédiatrique Intersurgical EcoLite™		42
1454015	Kit nébuliseur Cirrus2 avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ et tuyau	2.1m	36
1454010	Kit nébuliseur Cirrus2 avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ et tuyau sans PVC	2.1m	36
1468015	Kit nébuliseur HOT Top2 avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ et tuyau	1.8m	36

Kit venturi, avec masque Intersurgical EcoLite™

Ce kit comprend un masque Intersurgical EcoLite, contribuant au confort du patient et à la réduction de l'impact environnemental.



REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1107012	Kit venturi avec jeu de valves, masque Intersurgical EcoLite™ pédiatrique et tuyau	1.8m	30

Produit à faible impact environnemental

IS10.27 FR • Issue 12 03.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy
Japan • Lithuania • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA