



STARMed Ventumask Basic

Pour CPAP, avec générateur de débit Venturi et valve de PEEP réglable



Désormais disponible

avec port pour nébuliseur

CV209S (Petit)
CV209M/L (Moyen/Grand)
CV209XL (Extra Grand)

Kit nébuliseur non inclus

Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient ▪ **STARMed**

STARMed Ventumask Basic avec générateur de débit Venturi & valve de PEEP réglable

StarMed Ventumask Basic

StarMed Ventumask Basic est un concept unique pour la thérapie CPAP, fonctionnant simplement à partir d'une source d'oxygène appropriée. Il peut être utilisé en intra comme en extra hospitalier, par exemple en véhicule de secours.

Avantages et Caractéristiques Techniques

- Ventumask Basic est un dispositif complet et simple d'utilisation, constitué d'un masque CPAP, d'un générateur de débit Venturi, d'une valve de PEEP réglable et d'un tuyau à oxygène
- Le générateur de débit Venturi intégré fonctionne avec un simple débitmètre à oxygène pour délivrer de hauts débits tout en limitant la consommation d'oxygène
- La valve de PEEP réglable intégrée, spécifiquement conçue pour le Ventumask Basic, facilite la sélection des pressions expiratoires : 5 - 7.5 - 10 - 12.5 cm H₂O
- Chaque niveau de PEEP peut délivrer 40% d'O₂
- Un tableau de performances est fourni avec chaque produit, pour connaître le débit total selon chaque réglage de PEEP

Composition du kit :

Masque CPAP avec valve de sécurité et prise pour monitoring du % d'O₂ ou de la pression

Générateur de débit Venturi intégré au masque

Serre-tête réglable inclus

Valve de PEEP réglable conçue pour le Ventumask Basic facilitant le réglage de la pression expiratoire

Tuyau à oxygène intégré



Ventumask Basic pour CPAP avec générateur de débit Venturi et valve de PEEP réglable

Prescription		Réglage		Débit total	
% d'O ₂ approx	PEEP cmH ₂ O	Débit O ₂ L/min	Débit approx L/min		
40%	5	12	57		
	7.5	12	52		
	10	12	47		
	12.5	12	42		

Tableau de performances sujet à modifications. Référez-vous toujours aux instructions d'utilisation du produit.

Référence	Description	Taille	Qté/bte
CV203S	Ventumask Basic masque CPAP avec générateur de débit Venturi intégré et valve de PEEP réglable	Petit	5
CV203M/L	Ventumask Basic masque CPAP avec générateur de débit Venturi intégré et valve de PEEP réglable	Moyen / Grand	5
CV203XL	Ventumask Basic masque CPAP avec générateur de débit Venturi intégré et valve de PEEP réglable	Extra Grand	5

STARMed
Voir la gamme

www.intersurgical.com/info/starmed

Vidéo disponible sur www.intersurgical.com



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Fabricant :
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italie

IS1.45_FR • Issue 6 06.20